

Je commande le kit de lavement Reprop

 Madame Monsieur

Nom

Prénom

Adresse

Code postal.....

Ville.....

Téléphone mobile*.....

E-mail.....

*Important pour la livraison

Conformément à la loi Informatique et Liberté N°7817 du 06/01/1978, je dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations me concernant.

Reprop a-t-il été recommandé par un professionnel de santé ?

 Oui Non

Si oui, nom - Code Postal / Ville du prescripteur :

Je souhaite commander :

 Reprop Basic à 24,95€ Reprop Confort à 27,95€ Reprop Basic avec trousse à 28,95 € Reprop Confort avec trousse à 29,95€

Possibilités de paiement

Par internet avec paiement sécurisé

www.bivea-medical.fr

Par chèque à l'ordre de Bivea

Bon de commande + chèque à retourner à l'adresse :
BIVEA, 6 rue du Solarium, 33170 Gradignan

Par téléphone

au 05 57 26 09 00 avec règlement par CB

Chez Bivea, nous voulons vous proposer des produits sains, auxquels on croit, respectueux de votre corps et surtout qui vous soulagent au quotidien.

Reprop s'inscrit dans notre gamme de produit développée selon ces principes.

- Fabriqué en Suisse
- Dispositif médical

Des questions ?

N'hésitez pas à nous contacter par téléphone au **05 57 26 09 00**

Où trouver Reprop ?

Sur notre site internet

www.bivea-medical.fr6 rue du Solarium
33170 Gradignan05 57 26 09 00
info@bivea-medical.fr
www.bivea-medical.fr

Création : Bivea - Impression : Saxoprint - Crédits photos : Bivea - Ne pas jeter sur la voie publique - 082024




Reprop

Kits de lavement intestinal
Dispositifs médicaux

Qu'est ce que Reprop ?


Reprop est un kit de lavement intestinal réutilisable, rapide et simple d'utilisation.

Le lavement intestinal consiste à introduire de l'eau par l'anus dans le rectum vers le gros intestin. Cette stimulation permet d'éliminer les gaz et l'évacuation des selles grâce aux mouvements péristaltiques.

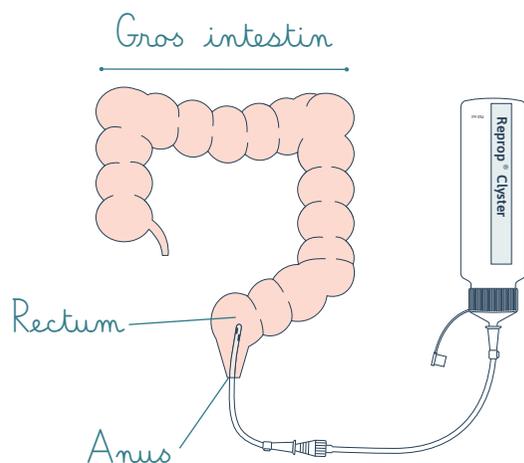

Utilisation

- Remplir le flacon d'eau,
- Placer la rallonge sur le flacon et connecter la sonde rectale à la rallonge,
- Une fois bien installé, insérer la sonde de quelques centimètres dans le rectum,
- Appuyer sur le flacon pour faire sortir l'eau,
- Les selles sont évacuées.

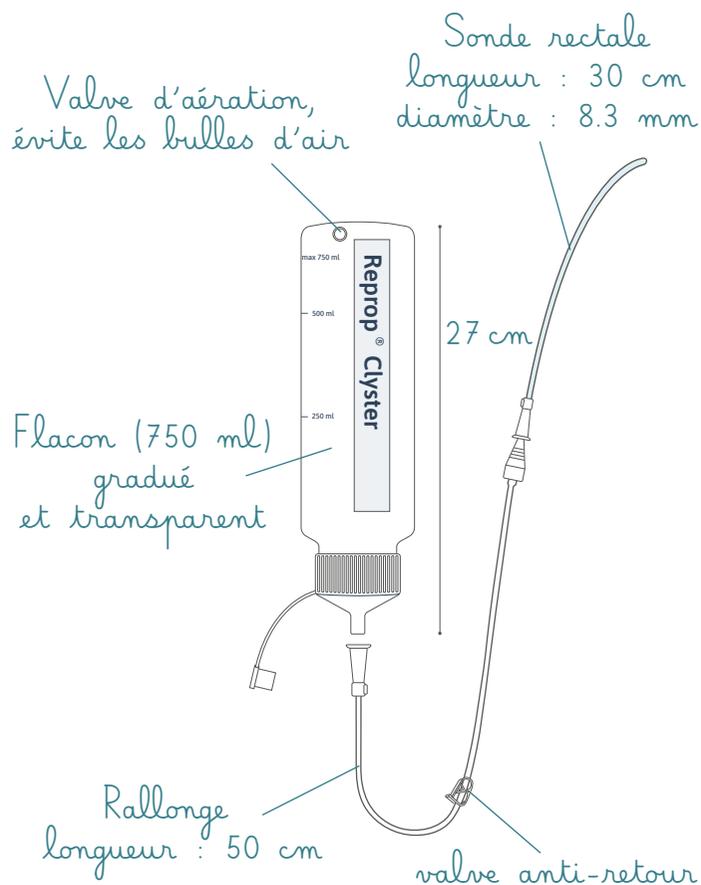

Avantages

- Dispositif médical,
- Flacon d'une grande contenance,
- Sonde arrondie et souple, en silicone médical.

Reprop vous permet de :

- Réaliser un lavement rapidement avec un effet immédiat,
- Faire des pauses grâce à la valve anti-retour,
- Vous installer confortablement grâce à la rallonge de 50 cm.

Quel modèle choisir ?



Reprop Basic

- 1 flacon
- 1 rallonge
- 3 sondes rectales



Reprop Basic avec trousse

- 1 flacon
- 1 rallonge
- 6 sondes rectales
- 1 trousse



Reprop Confort

- 1 flacon
- 1 rallonge
- 1 tuyau - rallonge
- 1 sonde rectale avec olive



Reprop Confort avec trousse

- 1 flacon
- 1 rallonge
- 1 tuyau - rallonge
- 1 sonde rectale avec olive
- 1 trousse