

Cayagel est un gel contraceptif conçu pour renforcer l'effet barrière du diaphragme.

Il est composé de **cellulose** et d'**acide lactique**.

La cellulose

Constitue une barrière mécanique au niveau du col de l'utérus.

L'acide lactique

Naturellement présent dans le vagin, immobilise les spermatozoïdes par son acidité.



La boîte contient :

- un tube de 60gr (une quinzaine d'utilisations)
- un applicateur gradué

Cayagel :

- n'est **pas contre-indiqué** en cas d'allaitement,
- est **incolore** et **comestible**,
- **ne doit pas être utilisé sans diaphragme**.

Les avantages du diaphragme à différentes tailles

- Sans hormones
- Simple d'utilisation
- Sans effets secondaires
- Réutilisable pendant 2 ans
- Sans latex
- Écologique et économique
- Triple sécurité en complément du gel contraceptif



Quand privilégier le diaphragme à différentes tailles par rapport au diaphragme à taille unique ?

Il est adapté aux femmes ayant besoin d'un diaphragme plus petit ou plus grand que le diaphragme à taille unique ou pour celles ayant une symphyse pubienne peu prononcée.

Comment commander ?

Il est disponible **en pharmacie, sur ordonnance** d'un médecin ou d'une sage-femme.

La taille appropriée à votre morphologie doit être au préalable choisie chez votre professionnel de santé, avant l'achat du diaphragme. Une consultation permet de bénéficier de conseils quant à l'insertion, le contrôle du positionnement et le retrait du diaphragme.

Quand utilise-t-on le diaphragme ?

Le diaphragme ne doit être utilisé que lors des rapports sexuels. Comme il n'existe pas de jour sans risque, il doit être utilisé à chaque rapport.

Peut-on être allergique au diaphragme ?

Le diaphragme étant en silicone, il n'y a pas de risque d'allergie connu.

Le diaphragme protège-t-il des infections sexuellement transmissibles ?

Non, le diaphragme ne protège pas des IST. Le seul moyen de protection reste le préservatif.

Pour toute autre information, parlez-en à votre médecin ou sage-femme.

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
Veillez à bien lire la notice avant d'utiliser le diaphragme et Cayagel. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Fabriqué en Allemagne par Medintim CE 0483

SUIVEZ-NOUS



Crédits photos : Bivea - Réalisation : Studio Polette - Ne pas jeter sur la voie publique - 092021



Diaphragme à
tailles différentes

7 tailles au choix
pour chaque femme

Sans hormones, simple et sûr



Beaucoup de femmes veulent une contraception naturelle, sûre et sans hormones !


Qu'est-ce qu'un diaphragme ?

Le diaphragme est un moyen de contraception qui s'insère dans le vagin avant un rapport sexuel. Il agit comme une barrière bloquant l'entrée des spermatozoïdes dans l'utérus. Il est constitué d'une fine membrane en silicone en forme de dôme, maintenue par un anneau souple. Correctement positionné sur toute la profondeur du vagin, il offre une protection discrète et ne procure aucune sensation de gêne, ni pour l'homme ni pour la femme.

COMMENT L'UTILISER ?


Il est placé entre l'os du pubis et le fond du vagin en recouvrant le col de l'utérus.

Avant de l'insérer, déposez 4ml de gel contraceptif, comme Cayagel, dans le creux du diaphragme.

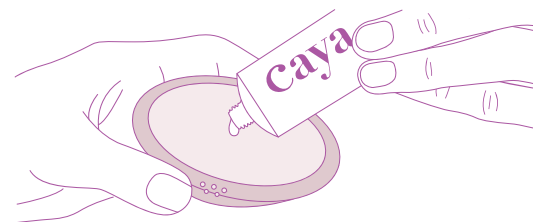


Insertion dans le vagin

Le diaphragme peut être mis en place au moment du rapport sexuel ou jusqu'à 2 heures avant.

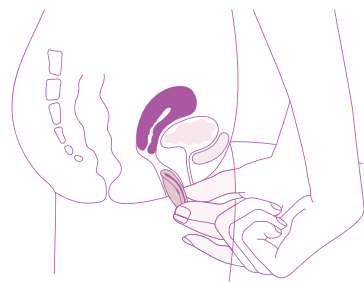


Sentir le col de l'utérus à travers la membrane

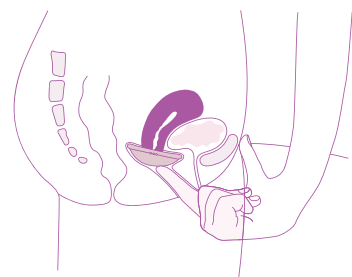

Il doit être retiré entre 6 et 24 heures après le dernier rapport. Une fois retiré, le diaphragme doit être lavé à l'eau tiède avec un peu de savon, séché et rangé dans sa boîte de protection. **Il est réutilisable pendant 2 ans.**

Caractéristiques du diaphragme à différentes tailles

- Existe en 7 tailles de 60 à 90mm
- Se plie de manière compacte pour une insertion facile

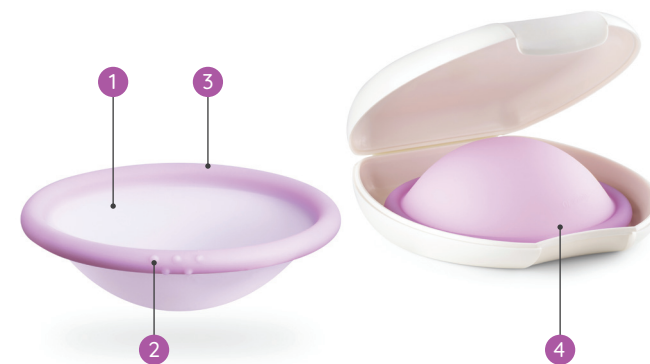

1

Fine membrane en silicone

Il s'adapte aux différentes formes de col d'utérus.

2

Picots d'accroche

Permet de bien tenir le diaphragme

3

Rebord souple

4

Signalétique

Le nom et la taille du diaphragme sont indiqués

Vous recevrez le diaphragme à différentes tailles avec un mode d'emploi et une boîte de rangement.

À qui est destiné le diaphragme ?

Il est plus particulièrement adapté aux femmes :

- voulant maîtriser leur contraception
- désirant une contraception non hormonale
- fumeuses, diabétiques

Il n'est pas adapté aux femmes :

- ayant accouché il y a moins de 6 semaines
- ayant un prolapsus très prononcé



Son efficacité

L'efficacité du diaphragme avec Cayagel est équivalente à celle du préservatif masculin.

Le **bon positionnement**, l'utilisation à **chaque rapport**, et le retrait **au moins 6 heures** après le dernier rapport sont indispensables pour une efficacité optimale.

Triple sécurité

- 1 **Membrane en silicone :** barrière mécanique
- 2 **Cellulose dans Cayagel :** 2^{ème} barrière mécanique au niveau du col
- 3 **Acide lactique dans Cayagel :** immobilisation des spermatozoïdes