

## BON DE COMMANDE

Monsieur  Madame

Nom.....

Prénom.....

Adresse.....

Code postal.....

Ville.....

Téléphone mobile\*.....

Téléphone fixe\*.....

E-mail.....

\*Important pour la livraison

Conformément à la loi Informatique et Liberté N°7817 du 06/01/1978,  
je dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations me concernant.

Stop-Uri a-t-il été recommandé par un professionnel de  
santé ?  Oui  Non

Si oui, Nom et Ville + CP du prescripteur :

## Possibilités de paiement

Par internet avec paiement sécurisé

[www.bivea-medical.fr](http://www.bivea-medical.fr)

Par chèque à l'ordre de Bivea

- Paiement en 1 fois avec un chèque de 98€
- Paiement en 3 fois sans frais :  
3 chèques encaissés à 1 mois d'intervalle  
2 chèques de 33€ et un chèque de 32€.

À retourner à l'adresse : Bivea Médical  
6 rue du Solarium, 33170 Gradignan

Par téléphone


au 05 57 26 09 00 avec règlement par CB  
(en 1 fois ou en 3 fois sans frais).

## Garantie

L'ensemble des pièces (hors consommable)  
sont garanties pendant 2 ans.

SATISFAIT OU REMBOURSÉ  
PENDANT 30 JOURS.

L'équipe **Bivea** est formée  
pour répondre à vos questions  
et vous apporte un soutien  
sur l'utilisation de Stop-Uri.

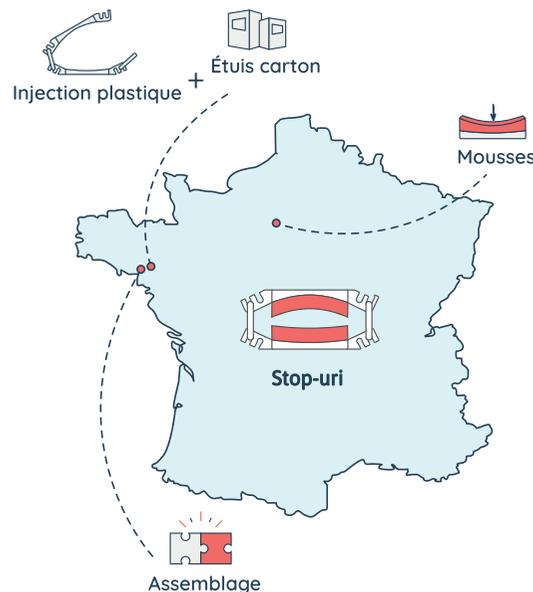

Dispositif médical CE. Fabrication française.  
Lire attentivement les instructions figurant sur la notice.  
En cas de doute, demandez conseil à votre médecin.



Création : Studio Polette - Impression : Saxoprint - Crédits photos : Bivea et Adobe Stock - Ne pas jeter sur la voie publique - 062023

## INCONTINENCE DE L'HOMME



**Stop-uri®**


Pinces péniennes  
Dispositifs médicaux  
en cas de troubles  
de l'incontinence



05 57 26 09 00 - [info@bivea-medical.fr](mailto:info@bivea-medical.fr)  
[www.stop-uri.fr](http://www.stop-uri.fr) - [www.bivea-medical.fr](http://www.bivea-medical.fr)

# Les pinces péniennes Stop-Uri

Stop-Uri est la solution efficace en cas d'incontinence légère et moyenne. Elle compense les sphincters défaillants, après une chirurgie, maladie ou lié à l'âge.

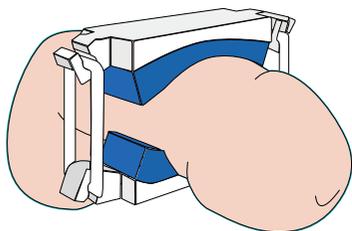

Les pinces s'adaptent sur le pénis juste derrière le gland pour comprimer et fermer l'urètre jusqu'à ce que le besoin d'uriner se fasse sentir.



## ADAPTABLES

Réglage facile et personnalisé grâce aux différentes tailles de barrettes interchangeables ; les pinces Stop-Uri s'adaptent à tous.



## CONFORTABLES

Légères et ergonomiques, la vascularisation du pénis se fait sur les côtés des pinces grâce au réglage des barrettes et à la souplesse de la mousse.




## PRATIQUES

- Pinces fournies par lot de 2
- Discrètes à travers les vêtements
- Hygiéniques

# Pourquoi choisir une pince Stop-Uri ?

## MOUVEMENTS ET ACTIVITÉS

- Lorsque vous portez le Stop-Uri, la vessie se remplit normalement. Vous pouvez ainsi faire toutes les activités qui vous donne envie.
- Elle permet de se baigner grâce à sa discrétion et à sa mousse étanche.
- La boîte comprend 2 pinces Stop-Uri pour pouvoir **les porter en alternance** un jour sur deux. Cela permet de laisser la mousse reprendre sa forme initiale pour conserver toute son efficacité.
- Permet d'être autonome, préserve votre estime de soi et la confiance en soi.

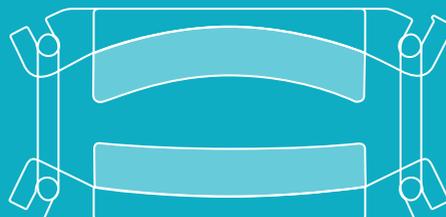

## 100% MADE IN FRANCE

- Produits de qualité et durables.
- Savoir-faire français de la fabrication jusqu'à l'assemblage.
- Fabriqué dans nos ateliers partenaires situés principalement en Bretagne.
- Tous les matériaux qui composent la pince pénienne proviennent de France.

## BON DE COMMANDE

Nous vous proposons 2 modèles de pinces péniennes.

Je commande le lot de 2 Stop-Uri "historique" à 98 €.

Modèle "historique" : évolution d'année en année.

- 2 pinces avec mousse étanche à mémoire de forme
- 4 tailles de barrettes différentes
- 2 crochets de serrage pour régler l'ajustement
- 1 boîte de transport
- 1 notice



Garantie SATISFAIT  
OU REMBOURSÉ 1 mois

Je commande le lot de 2 Stop-Uri Confort à 98 €.

Modèle adapté aux pénis rétractés grâce à sa pince plus courte que le Stop-Uri "historique" (- 0,5 mm).

- 2 pinces avec mousse étanche à mémoire de forme
- 5 tailles de barrettes différentes
- 1 crochet de serrage pour régler l'ajustement
- 1 boîte de transport
- 1 notice



Garantie SATISFAIT  
OU REMBOURSÉ 1 mois