

Cayagel est un gel contraceptif conçu pour renforcer l'effet barrière du diaphragme.

Il est composé de cellulose et d'acide lactique.

- La cellulose constitue une barrière mécanique au niveau du col de l'utérus.
- L'acide lactique, naturellement présent dans le vagin, immobilise les spermatozoïdes par son acidité.



Cayagel :

- Un tube de 60g (une quinzaine d'utilisations)

Il n'est pas contre-indiqué en cas d'allaitement.

Le gel est incolore et comestible.

Cayagel ne doit pas être utilisé sans diaphragme



Comment commander ?

Il est disponible exclusivement en pharmacie, sur ordonnance d'un médecin ou d'une sage-femme.

Une consultation avec un professionnel de la santé permet de bénéficier de conseils quant à l'insertion, le contrôle du positionnement et le retrait du diaphragme.

Quand utilise-t-on le diaphragme ?

Le diaphragme ne doit être utilisé que lors des rapports sexuels. Comme il n'existe pas de jour sans risque, il doit être utilisé à chaque rapport.

Peut-on être allergique au diaphragme ?

Le diaphragme étant en silicone, il n'y a pas de risque d'allergie connu.

Le diaphragme protège-t-il des infections sexuellement transmissibles ?

Non, le diaphragme ne protège pas des IST. Le seul moyen de protection reste le préservatif.

Pour toutes autres informations, parlez-en à votre médecin ou sage-femme.

Veillez à bien lire la notice avant d'utiliser le diaphragme et Cayagel. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

Fabriquée en Allemagne par Medintim CE 0483



6 rue du Solarium
33170 Gradignan



05 57 26 09 00
info@bivea-medical.fr
www.bivea-medical.fr



Diaphragme à taille unique

Fait par des femmes,
pour des femmes !


Sans hormones, naturel et sûr



Le diaphragme à taille unique est le résultat de plus de 15 ans d'études indépendantes.

Qu'est ce que le diaphragme ?

Le diaphragme est un moyen de contraception qui s'insère dans le vagin avant un rapport sexuel. Il agit comme **une barrière bloquant l'entrée des spermatozoïdes dans l'utérus.**

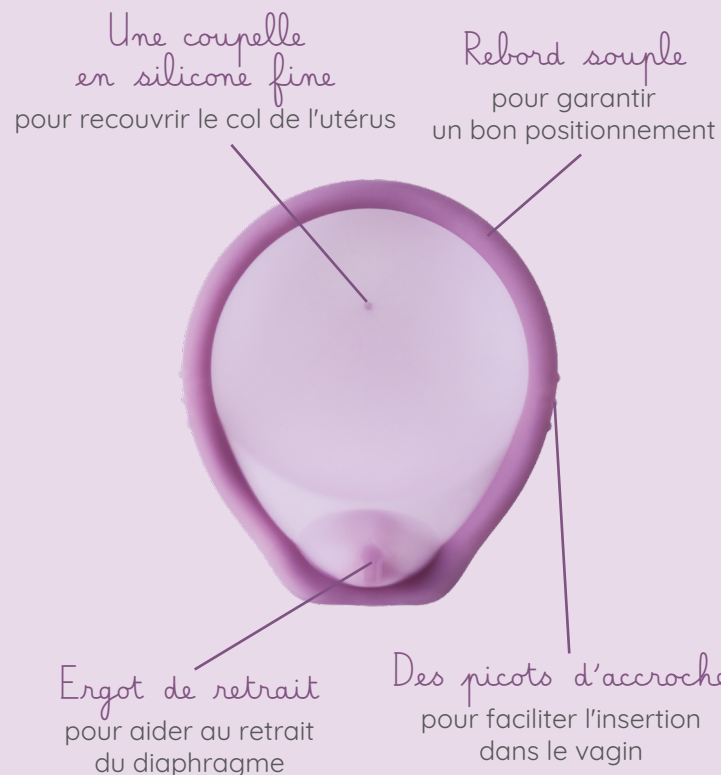


Comment le positionner ?

Il est bloqué entre l'os du pubis et le fond du vagin en recouvrant le col de l'utérus.

COMMENT L'UTILISER

Avant de l'insérer, déposez 4ml de gel contraceptif, Cayagel, dans le creux du diaphragme.

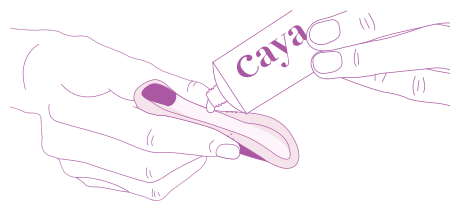


Insertion dans le vagin

Le diaphragme peut être mis en place au moment du rapport sexuel ou jusqu'à 2 heures avant.



Vérification du positionnement

Vérifier avec un doigt que le col de l'utérus est recouvert par la membrane du diaphragme.

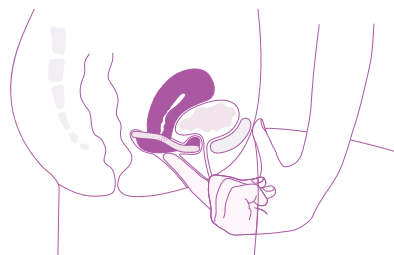

Il doit être retiré entre 6 et 24 heures après le dernier rapport. Une fois retiré, le diaphragme doit être lavé à l'eau tiède avec un peu de savon, séché et rangé dans sa boîte de protection. Il est **réutilisable pendant 2 ans.**

À qui est destiné le diaphragme ?

Il est plus particulièrement adapté aux femmes :

- désirant une contraception non hormonale
- voulant maîtriser leur contraception
- fumeuses, diabétiques

Il n'est pas adapté aux femmes :

- ayant accouché il y a moins de 6 semaines
- ayant un prolapsus très prononcé



Son efficacité

L'efficacité du diaphragme à taille unique avec Cayagel est **équivalente à celle du préservatif masculin.**

Le bon positionnement, l'utilisation à chaque rapport, et le retrait au moins 6 heures après le dernier rapport sont indispensables pour une efficacité optimale.

Triple sécurité

- 1 Membrane en silicone : **barrière mécanique**
- 2 Cellulose dans Cayagel : **2ème barrière mécanique au niveau du col**
- 3 Acide lactique dans Cayagel : **immobilisation des spermatozoïdes**