

BON DE COMMANDE

Je commande Réhabi® : prix comprenant la malette, la tête d'aspiration, un cylindre, un manchon vert souple, un lubrifiant Animé de 50ml et une notice d'utilisation.

Monsieur Madame

Nom.....

Prénom.....

Adresse.....

Code postal.....

Ville.....

Téléphone fixe.....

Téléphone mobile.....

E-mail.....

Conformément à la loi Informatique et Liberté N°7817 du 06/01/1978, je dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations me concernant.

Le Réhabi a-t-il été recommandé par un professionnel de santé ?

Oui Non

Si oui, nom - CP/ Ville du prescripteur :
.....

Possibilités de paiement

PAR INTERNET AVEC PAIEMENT SÉCURISÉ

www.bivea-medical.fr

PAR CHÈQUE À L'ORDRE DE BIVEA

Paiement en 1 fois avec 1 chèque de 198€

Paiement en 3 fois sans frais en joignant
3 chèques de 66€ encaissés à 1 mois d'intervalle.

À retourner à l'adresse : Bivea Médical
22 Avenue Ferdinand de Lesseps - 33610 Canéjan

GARANTIE

L'ensemble des pièces est garanti pendant 2 ans.

Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE.

REHABI® est fabriqué par MEDintim, entreprise allemande certifiée ISO 13485.

L'équipe Bivea Médical est formée pour répondre à vos questions et vous aide dans l'apprentissage de l'appareil.

Demandez conseil à votre médecin


MEDintim
personal healthcare



Création : Bivea - Impression : Saxoprint - Crédits photos : Bivea et fotolia.fr - Ne pas jeter sur la voie publique - 042021



RÉÉDUCATION PÉNIENNE



Rehabi®

Maintien de la taille
du pénis et restauration
de la fonction érectile

05 57 26 09 00 - info@bivea-medical.fr
www.bivea-medical.fr



Rehabi[®], LA rééducation pénienne

REHABI[®] est un dispositif médical visant à restaurer et à maintenir la fonction érectile.




Il permet :

- Une rééducation pénienne suite à une prostatectomie, pour améliorer la fonction érectile et réduire une éventuelle incontinence,
- De réduire le degré de courbure en cas de maladie de la Peyronie (courbure du pénis).

FONCTIONNEMENT

REHABI[®] génère une dépression dans le cylindre entourant le pénis, ce qui permet aux corps caverneux de se gorger de sang, entraînant ainsi un raidissement du pénis.

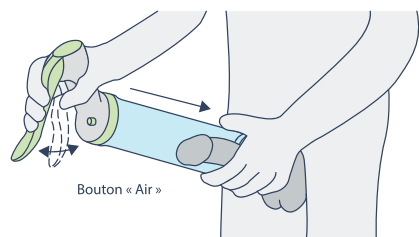

Le sang artériel riche en oxygène circule dans les corps caverneux et spongieux, les muscles lisses sont ainsi mieux oxygénés. Ceci lutte contre la transformation du tissu des corps caverneux en tissu conjonctif non élastique et contre une réduction de la longueur du pénis et de son volume.

UTILISATION


La rééducation peut commencer dès la cicatrisation si vous avez subi une opération. REHABI[®] peut être utilisé même après plusieurs années de troubles de l'érection.

REHABI[®] doit être **utilisé quotidiennement** (5 à 10 minutes) pour recréer l'équivalent d'une érection matinale. Aucun risque de dépression trop forte : une simple pression sur le bouton vert «Air» sur la tête de pompe permet de stopper instantanément la dépression.

N.B : plus la rééducation se fait tôt et meilleurs seront les résultats.

EFFICACITÉ

REHABI[®] permet d'oxygéner les tissus du pénis afin d'améliorer la fonction érectile (même si les nerfs érectiles ont été endommagés).

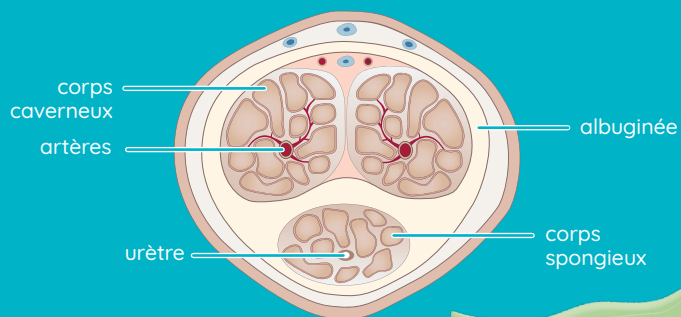

Vue de coupe du pénis

Réhabi[®] Contenu du kit

- 1 tête de pompe manuelle
- 1 cylindre transparent en polycarbonate
- 1 manchon
- 1 tube de lubrifiant Animé 50 ml
- 1 trousse de rangement
- 1 notice en français



AVANTAGES

- Solution mécanique et non médicamenteuse
- Irrigation du gland contrairement à d'autres solutions
- Aucune douleurs ressenties
- Pas d'appréhension = rééducation bien suivie
- Utilisation possible comme pompe à érection (kit supplémentaire)