


## Comment utiliser la Lunacopine ?



Lavez-vous soigneusement les mains.

Pliez la Lunacopine en appuyant sur le rebord à l'aide d'un doigt.

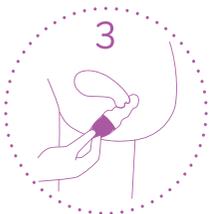

Mettez-vous dans une position confortable et insérez la Lunacopine.

Une fois en place, la Lunacopine peut être utilisée de 6 à 8 heures d'affilées.



## Quelle Lunacopine choisir ?

La forme et la taille de la **Lunacopine** permettent à toutes les femmes d'utiliser la coupe menstruelle.



### TAILLE 1

- de 30 ans  
Règles peu abondantes  
Femmes n'ayant pas accouché

### TAILLE 2

+ de 30 ans  
Règles abondantes  
Femmes ayant déjà accouché

Vous avez encore un doute ? Contactez-nous.

## Existe en différentes couleurs !



## Où trouver la Lunacopine ?

### SUR NOTRE SITE INTERNET

[www.lunacopine.fr](http://www.lunacopine.fr)

### EN MAGASIN BIO

Retrouvez la liste des points de vente sur [www.lunacopine.fr](http://www.lunacopine.fr)

SUIVEZ-NOUS



Création : Studio Polette - Impression : Saxoprint - Crédits photos : Bivea et fotoia.fr - Ne pas jeter sur la voie publique - 082020

COUPE MENSTRUELLE



# Lunacopine

La solution pour des règles écologiques et économiques



05 57 26 09 00 - [info@lunacopine.fr](mailto:info@lunacopine.fr)  
[www.lunacopine.fr](http://www.lunacopine.fr) - [www.bivea-medical.fr](http://www.bivea-medical.fr)



## Les avantages de la Lunacopine



### CONFORT

Depuis plus de 15 ans, la **Lunacopine** apporte souplesse et douceur. Moins longue qu'un tampon, elle épouse la forme du vagin. Une fois en place, elle sera vite oubliée et vous pourrez maintenir vos activités habituelles.



### SANTÉ ET HYGIÈNE

- Peut-être gardée pendant de 6 à 8 heures consécutives
- 100% silicone médical platine
- Aucune contre-indication, même avec DIU
- N'assèche pas le vagin
- Pas de mauvaises odeurs
- La Lunacopine n'est pas souillée lors des mictions
- La Lunacopine est parfaitement adaptée à la baignade



### ÉCONOMIES

La Lunacopine est vite rentabilisée. Dans sa vie, une femme dépense en moyenne 2 400€ dans l'achat de ses protections périodiques. La **Lunacopine** durera plusieurs années et elle ne coûte que 25€.



### RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Dans une vie, une femme peut utiliser jusqu'à 12 000 tampons ou serviettes. Réutilisable, la **Lunacopine** ne produit pas de déchets et limite la pollution à la production. En France, 2 milliards de protections périodiques sont jetées chaque année. Avec la **Lunacopine** vous agissez directement pour l'environnement.



Les femmes adoptent la Lunacopine sans hésiter pour son côté simple, pratique et économique.

### PRATIQUE AU QUOTIDIEN

Une **Lunacopine** suffit à votre protection intime pour une journée et ce pendant plusieurs années. Vendue avec sa pochette de rangement, elle prend peu de place dans le sac. Pratique au quotidien comme en voyage, de l'eau suffie pour la nettoyer. Un savon au pH neutre peut aussi convenir.

Discrète et fiable, la **Lunacopine** est idéale pour les femmes actives. Vous pourrez vous adonner sans crainte à vos activités sportives favorites : course, natation, danse, etc.

### CERTIFIÉE

Elle a été certifiée par la Vegan Society. Fabriquée en Finlande, la Lunacopine est certifiée par les normes internationales FDA & TGA. Elle ne contient ni bisphénol ni phtalate.



## Pourquoi choisir la Lunacopine ?

La **Lunacopine** est depuis des années la plus aboutie et la plus confortable des coupes menstruelles. Forme unique, douceur du silicone médical aux angles totalement arrondis, elle saura respecter votre intimité et se montrera très pratique au quotidien.

### GRANDE SOUPLESSE ET DOUCEUR



## La Lunacopine en chiffres

dans une vie pour une femme :

Lunacopine	Protection périodiques jetables
2 à 6 produits	+ ou - 12 000 produits
50 à 150€	+ ou - 2400€
2 à 6 déchets	+ ou - 12 000 déchets