

Bon de commande

Madame Monsieur

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Téléphone mobile*

Téléphone fixe*

E-mail

*Important pour la livraison
Conformément à la loi Informatique et Liberté N°7817 du 06/01/1978,
je dispose d'un droit d'accès et de rectification aux informations me concernant.

Vagiwell a-t-il été recommandé par un professionnel de santé ?

Oui Non

Si oui, nom - CP/ Ville du prescripteur :

Je souhaite commander :

- Vagiwell Premium à 98 € Vagiwell 5LS à 48,90 €
 Vagiwell Large à 69 € Vagiwell 6 à 48,90 €
 Vagiwell Small à 69 €

Possibilités de paiement

PAR INTERNET AVEC PAIEMENT SÉCURISÉ
www.bivea-medical.fr

PAR CHÈQUE À L'ORDRE DE BIVEA
Bon de commande + chèque à retourner à l'adresse :
Bivea Médical 6 rue du Solarium - 33170 Gradignan

PAR TÉLÉPHONE
au 05 57 26 09 00 avec règlement par CB
Depuis l'étranger 00 33 5 57 26 09 00

Questions

Les dilatateurs Vagiwell peuvent-ils s'utiliser sans prescription médicale et sans accompagnement par un professionnel de santé ?

Les dilatateurs vaginaux Vagiwell sont en vente libre et ne nécessitent pas de prescription médicale. Ils peuvent s'utiliser seule chez soi en toute intimité, avec l'aide du conjoint, d'un médecin ou d'un thérapeute.

Toutefois, il est vivement conseillé, pour une plus grande efficacité et afin de rester motivée tout le long du programme, d'être accompagnée par un médecin, une sage femme ou un kinésithérapeute.

Quelle est la différence entre Vagiwell et un sextoy ?

Un dilatateur vaginal est un dispositif médical, spécialement conçu pour l'accompagnement thérapeutique et la rééducation sexuelle des femmes.



Pour toute autre information,
parlez-en à votre médecin,
sage-femme, sexologue ou
kinésithérapeute.

Garantie et service

En silicone médical
Forme anatomique
Produits certifiés CE
Fabriqué en Allemagne

Satisfait ou remboursé pendant 30 jours.

L'équipe de Bivea Médical
est formée pour répondre
à vos questions.

Où trouver Vagiwell ?

Sur notre site internet
www.bivea-medical.fr



Dispositif médical CE



Vaginisme et dyspareunie



Vagiwell

Dilatateurs vaginaux
Dispositifs médicaux



05 57 26 09 00 - info@bivea-medical.fr
www.bivea-medical.fr

Crédits photos : Bivea et Fotolia - Réalisation : Studio Polette - Ne pas jeter sur la voie publique - 042021

Qu'est ce qu'un dilatateur vaginal Vagiwell ?

Les Vagiwell sont des dilatateurs vaginaux de tailles, couleurs et diamètres différents.

Par des exercices réguliers, ils permettent à la femme de prendre conscience de ses muscles péri-vaginaux et de rendre peu à peu possible le rapport sexuel. Cela permet de contrôler progressivement la contraction musculaire involontaire pouvant être conditionnée par l'angoisse de la pénétration et la peur de la douleur.

Les dilatateurs vaginaux Vagiwell sont de forme ergonomique et anatomique. Leurs extrémités permettent une introduction tout en douceur.



Comment l'utiliser ?

Avant de procéder à l'insertion du dilatateur dans le vagin, s'isoler dans un endroit calme et relaxant.

Vous avez le choix entre deux postures pour mener les exercices :

• ALLONGÉE

Allongez-vous sur le dos, repliez les genoux et écartez les légèrement.



• DEBOUT

Posez alors l'un de vos pieds sur une chaise ou un autre support surélevé.



Une fois la bonne posture trouvée, c'est à dire la plus confortable, vous allez pouvoir procéder à l'insertion du dilatateur.

Afin de rendre cette insertion plus aisée, nous préconisons d'imprégner l'extrémité du dilatateur d'un peu de lubrifiant Sylk fourni avec les dilatateurs Vagiwell. Il est important de procéder avec douceur. En aucun cas l'utilisation de cet accessoire ne doit être douloureuse.

Fréquence d'utilisation

- En première phase d'utilisation : effectuer les exercices **2 fois par jour (matin et soir)** durant 6 semaines.
- Puis continuer à une fréquence de **3 fois par semaine** durant 6 mois.
- Enfin, poursuivre les exercices **1 fois par semaine** aussi longtemps que vous le désirez.

Les lots de dilatateurs Vagiwell

Lot de 5 dilatateurs

Vagiwell Premium



- Vaginisme : contraction des muscles du vagin
- Dyspareunie : douleurs génitales lors des rapports sexuels

Lot des 3 plus grands dilatateurs

Vagiwell Large



- Post-opératoire : descente d'organes ou en cas de cancer
- Pendant et après une radiothérapie/chimiothérapie
- Après des opérations du vagin avec rétrécissement du vagin et cicatrisation

Lot des 3 plus petits dilatateurs

Vagiwell Small



- Cicatrisation après une épisiotomie ou une déchirure du périnée

Boîte contenant :

Les dilatateurs Vagiwell
Le lubrifiant Sylk 50ml, à base d'eau
Un pochon de rangement + une notice

Caractéristiques

- Forme ergonomique et anatomique,
- Doux au toucher, texture "moelleuse",
- Dilatateur légèrement souple,
- Prise en main facile grâce à l'encoche externe,
- Tailles pour une utilisation progressive,
- 1 couleur pastel différente pour chaque taille,
- 1 lot adapté à chaque femme.

Taille	Couleur	Diamètre	Longueur
Taille 1	Bleu	12/14 mm	122 mm
Taille 2	Vert	16/18 mm	135 mm
Taille 3	Violet	20/22 mm	150 mm
Taille 4	Rose	24/26 mm	163 mm
Taille 5	Beige	28/30 mm	177 mm
Taille 5 LS	Blanc	33/36 mm	181 mm
Taille 6	Blanc	36,5/40 mm	150 mm



Vagiwell 5LS

En cas de lichen scléreux



Vagiwell 6

En cas de vaginoplastie