

Medintim



Manual

Erection System

Traitement par la pompe à vide contre la dysfonction érectile (DE)

Medintim

Mettez en place
la tête de pompe.

Manual
Erection System

Medintim

Mettez en place
le grand manchon.

Manual
Erection System



Medintim

Mettez en place
le petit manchon.

Manual
Erection System



Medintim

Mettez en
place le cône.

Manual
Erection System



Medintim

Placez un anneau
de constriction
à l'aide du cône.

Manual
Erection System





Medintim

**Alternative:
Mettez l'anneau de
constriction avec
les mains.**

Manual
Erection System

Medintim

Utilisation



Medintim

Mettez du
lubrifiant.

Manual
Erection System



Medintim

Introduisez
le pénis dans
le cylindre.

Manual
Erection System

Medintim

Appuyez contre
le corps et pompez.

Manual
Erection System



Medintim

Tirez l'anneau
de constriction
sur le pénis.

Manual
Erection System



Medintim

L'érection est parfaite.
Enlever l'anneau après
max 30 min.

Manual
Erection System



Medintim

Après l'utilisation,
retirez l'anneau
de constriction du pénis.

Manual
Erection System



Medintim

État après l'utilisation.

Manual
Erection System

Medintim

Distribution en France:

BIVEA

www.bivea-medical.fr

Distribution au Maroc:

Intima medical

www.intima-medical.ma

Distribution en Belgique:

Memidis pharma

www.memidis.com



FDA registered device
Made in Germany



KESSEL Medintim GmbH
Kelsterbacher Str. 28
64546 Mörfelden-Walldorf
Germany

www.medintim.de