

Poche de gel

Imaginée pour la pratique des bains dérivatifs et pour soulager le périnée par le froid.

Appliquer de la fraîcheur sur la zone du périnée contribue à **stimuler la circulation sanguine**, favoriser le métabolisme et améliorer le bien-être au quotidien de façon naturelle.

Cette méthode peut être utilisée **pour les femmes et les hommes**.

Avantages

- Diffuse un **froid agréable** d'environ 1h,
- **Ergonomique** : poche souple et confortable,
- **Pratique**, étanche et réutilisable,
- **Discrète**, se place facilement dans les sous-vêtements,
- S'utilise également comme **poche de chaud**.

Contient du gel alimentaire avec un revêtement en nylon.

Choisir sa poche de gel pour la cryothérapie périnéale




Grand format,
idéal pour
la nuit

Petit format,
idéal pour
la journée

Utilisation

- Avant utilisation, placez la poche de gel à plat au congélateur (environ 2h),
- Enveloppez la poche de gel dans une housse ou un linge pour protéger la peau du froid,
- Glissez la poche de gel dans le sous-vêtement,
- Gardez la poche aussi longtemps que vous sentez la fraîcheur puis remplacez-la.

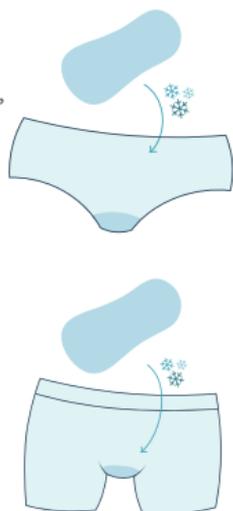

Conseils d'utilisation

- **Démarrez progressivement** la pratique du bain dérivatif,
- La fraîcheur ressentie doit toujours **être supportable**,
- Pour un meilleur roulement, prévoyez **3 à 6 poches de gel**,
- Le bain dérivatif s'inscrit en complément d'un mode de vie sain.



Des questions ?

Nous sommes à votre disposition
par téléphone au 05.57.26.09.00

Où acheter les poches de gel

Sur notre site internet
à 6€* l'unité petit/grand format
www.bivea-medical.fr

Également disponible en lot de 3, 6 ou 12 poches

* Frais de port non inclus
Tarif applicable en France
Métropolitaine



6 rue du Solarium
33170 Gradignan

05 57 26 09 00
info@bivea-medical.fr
www.bivea-medical.fr